



SUPER U SPRAY

Art.-Nr. 952 128

**Universal Reinigungs- und
Pflegespray für Turbinen Hand-
und Winkelstücke**

**Universal Spray for internal
maintenance cleaning and
lubrication of all type handpieces**

Gebrauchsanweisung:

Vor jeder Autoklav-Sterilisation, bzw. 2 mal täglich die Bohrantriebe ca. 2 Sekunden lang durchsprühen.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Enthält Propan, Butan.



**Gefahr
Danger**



+H65895212801

Direction for use:

Spray the instruments before each autoclave-sterilization, in any case 2 times daily for about 2 seconds. Wipe excess thoroughly.

Extremely flammable aerosol. Keep out of the reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Pressurized container: may burst if heated. Contains propane, butane. Solvent abuse can kill instantly.

LOT siehe Aufdruck
see imprint

500 ml e **650** **3** **CE**

 **Kent Express Limited**
(manufacturer) Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,
Studland Road, Kingsthorpe,
Northampton NN2 6NE U.K.
Tel:+44 1634 878 777

Rev.2015/09